

### Voor het eerste gebruik

Inspecteer bij ontvangst of de set compleet en onbeschadigd is. Neem contact op met de leverancier wanneer er problemen zijn of wanneer de trainingsset niet aan uw verwachtingen voldoet. Gebruik de set niet wanneer er onderdelen beschadigd zijn. De trainingsballon is niet steriel.

### Een set bestaat uit:


- 7 cm lange silicone ballon met een 90 cm lange pvc-slang met koppelstuk
- 3 weg kraan
- Spuit 60 ml

### Materiaal en eigenschappen

De ballon is gemaakt van polyisopreen en is geheel latex vrij. De ballon wordt gevuld met lucht of handwarm water, tot maximaal 400 ml. Met het 3-weg kraantje is ontkoppeling van de spuit mogelijk terwijl de lucht of het water in de ballon blijft en eventueel bijgevuld kan worden. De lengte neemt bij vulling toe tot circa 13 cm.

### Toepassing

Ter bewustwording van proprioceptie, compliance rectum ampul, en het aanleren van perstechniek. De ballon wordt met een glijmiddel op waterbasis (niet op olie, vaseline of siliconebasis) voorbij het anale kanaal ingebracht tot de rectum ampul. Tijdens vullen blijft de ballon goed gepositioneerd. Tijdens het aanleren van de perstechniek kan lichte tractie aan de ballon worden gegeven.

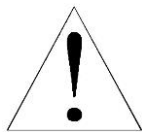

#### LET OP!

De ballon is uitsluitend voor éénmalig gebruik

De ballon mag alleen worden gebruikt op advies van een specialist (bijvoorbeeld seksuoloog, gynaecoloog, bekkenfysiotherapeut).


### Contra-indicaties

Overleg het gebruik van deze trainingsballon met uw arts, specialist of bekkenfysiotherapeut in de volgende gevallen:

- a. Rectale infectie/ontsteking
- b. Locale carcinomen

**Instructie 3-weg kraan**

- De 3-weg kraan heeft de vorm van een T.
- Verwijder de beschermkapjes (indien aanwezig).
- De 3-weg kraan heeft 2 vrouwelijke uitgangen en één mannelijke.
- Het uiteinde van de ballonslang al draaiend aan de mannelijke uitgang van de kraan bevestigen.
- De spuit al draaiend aan de vrouwelijke uitgang bevestigen, recht tegenover de aansluiting van de ballon.
- Leg de ballon en spuit voor u op tafel en draai het (gele) kraantje in de positie zoals afgebeeld in afbeelding 1. In deze positie is het mogelijk om de spuit met lucht te vullen.
- Draai het kraantje 90° met de klok mee (zie afbeelding 2). Het is nu mogelijk om de lucht uit te spuiten, in de ballon te persen. Draai het kraantje 90° tegen de klok in om de spuit opnieuw met lucht te vullen. Herhaal deze handelingen tot de juiste vulling in de ballon bereikt is.
- In de positie zoals afgebeeld in afbeelding 1, kan de spuit ontkoppeld worden; de ballon blijft dan in de gevulde toestand.
- Om de ballon leeg te laten lopen moet het kraantje gedraaid worden zoals weergegeven in afbeelding 3.

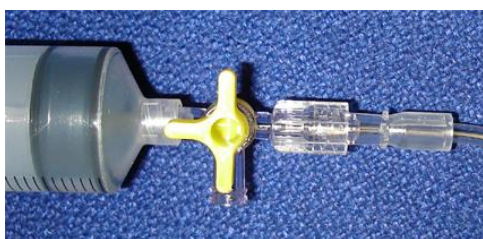

Afbeelding 1  
Vullen spuit



Afbeelding 2  
Vullen ballon



Afbeelding 3  
Leeglopen ballon

**Opmerking:**

De verpakking niet weggooien!

De informatie op de verpakking is noodzakelijk in geval van klachten of beschadiging.

**Glijmiddel op siliconenbasis tast de ballon aan, gelieve een glijmiddel op een andere basis te gebruiken.**



**Niet hergebruiken. Alleen eenmalig gebruik.**

**Gegevens leverancier**

Pelvitec BV  
Rotterdamseweg 183-C  
2629 HD Delft  
Nederland

Tel : +31 (0)10 – 303 22 90

Fax: +31 (0)10 – 303 22 91

[info@pelvitec.nl](mailto:info@pelvitec.nl)

[www.pelvitec.nl](http://www.pelvitec.nl)

**Gegevens fabrikant**

Pelvision BV  
Rotterdamseweg 183-C  
2629 HD Delft  
Nederland

Tel : +31 (0)10 – 303 22 92

Fax: +31 (0)10 – 303 22 93